



AQUASOL Femina Vaginal Atrophy

Περί της Κολπικής Ατροφίας

Η κολπική ατροφία ενδέχεται να εμφανιστεί σε όλες τις γυναίκες, αλλά είναι πιο συχνή σε εμμηνόπαυσιακές γυναίκες, και η πάθηση μπορεί να είναι ενοχλητική στην καθημερινότητα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κολπική ξηρότητα, αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία.

Πώς λειτουργεί

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι ένας τοπικός ενυδατικός παράγοντας, που ενεργεί ως μεμβράνη επί του κολπικού βλεννογόνου, παρέχοντας ανακούφιση από τα συμπτώματα που συνδέονται με την κολπική ατροφία, όπως η ξηρότητα, το αίσθημα καύσου, ο πόνος και η δυσφορία.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προσκολλάται στον κολπικό βλεννογόνο, βοηθώντας στον σχηματισμό ενός προστατευτικού φραγμού. Η κατάσταση της κολπικής χλωρίδας βελτιώνεται λόγω της διατήρησης της ενυδάτωσης στους κολπικούς ιστούς.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy υποστηρίζει τη φυσική διαδικασία επούλωσης του κατεστραμμένου ιστού, διεγείροντας τη φυσική υγρασία στον κόλπο, βοηθώντας στη βελτιστοποίηση της κατάστασης του κολπικού ιστού.

Ενδείξεις AQUASOL Femina Vaginal Atrophy

- Όταν έχετε συμπτώματα κολπικής ατροφίας όπως ξηρότητα, αίσθημα καύσου, πόνο και δυσφορία
- Όταν θέλετε να προλάβετε την κολπική ατροφία.

Πώς χρησιμοποιείται

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy εφαρμόζεται στον κόλπο και την περιβάλλουσα κολπική περιοχή για ανακούφιση από τα συμπτώματα κολπικής ατροφίας. Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy μπορεί να εφαρμοστεί και μέσα στον κόλπο με τη χρήση του παρεχόμενου applicatér.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy είναι συμβατό με τη χρήση προφυλακτικών από λάτεξ.

• ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Στην περίπτωση δυσφορίας στην εξωτερική ευαίσθητη περιοχή, μπορείτε να εφαρμόσετε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy με το δάχτυλο (πάντα να προσέχετε να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή).

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy διαθέτει ένα ειδικό applicatér, που βιδώνει επάνω στο σωληνάριο. Το applicatér σας επιτρέπει να εφαρμόσετε το προϊόν μέσα στον κόλπο.

Πάντα να πλένετε τα χέρια σας καλά πριν και μετά την εφαρμογή.

1. Αφαιρέστε το καπάκι από το σωληνάριο. Πριν από την πρώτη χρήση, τρυπήστε το σωληνάριο με το άκρο του καπακιού.
2. Βιδώστε το applicatér στο άνοιγμα του σωληναρίου.
3. Τραβήξτε το έμβολο για να γεμίσετε το applicatér, πιέζοντας ταυτόχρονα το σωληνάριο, έως ότου σταματήσει το έμβολο (μία δόση).
4. Ξεβιδώστε το applicatér από το σωληνάριο και βρείτε μια άνετη θέση, ώστε να εισάγετε το applicatér μέσα στον κόλπο. Πιέστε απαλά το έμβολο και αδειάστε ολόκληρη τη δόση του προϊόντος μέσα στον κόλπο (μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε μία λεπτή στρώση της κρέμας στην άκρη του applicatér για να διευκολυνθεί η εισαγωγή στον κόλπο).
5. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το applicatér πλένοντάς το με κλιμαρό νερό.
6. Τριψίτε το applicatér με τα δάχτυλα, γεμίζοντας και αδειάζοντας τον κύλινδρο επανειλημμένα με νερό.
7. Αφαιρέστε το περίσσιο νερό τινάζοντας το applicatér, και στεγνώστε με μια καθαρή πετσέτα.

Εφαρμογή

Για την πρόληψη των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την κολπική ατροφία, εφαρμόστε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy μία φορά ημερησίως για τουλάχιστον 5 ημέρες.

Για την ανακούφιση από την ξηρότητα και τον ερεθισμό, εφαρμόστε όπως και όταν απαιτείται.

Για την τόνωση της φυσικής υγρασίας του κόλπου, εφαρμόστε το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy κάθε μέρα πριν από τον ύπνο.

Σύσταση:

Aqua, Cetearyl Olivat, C12-13 Alkyl Lactate, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sorbitan Olivat, Dimethicone, Betaine, Paraffinum Liquidum, Butyrospermum Parkii Butter, Hydroxyethylcellulose, Tocopherol Acetate, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Dimethicone/peg-10/15 Crosspolymer, Phenoxyethanol, Benzyl Alcohol, Cera Alba, Panthenol, Potassium Sorbate, Sodium Hyaluronate, Tamarindus Indica Seed Polysaccharide, Xylitylglycoside, Anhydroxylytol, Disodium Edta, Lactic Acid, Xylitol, Allantoin, Oleyl Alcohol, Glucose, Dipropylene Glycol, Dioscorea Villosa Root Extract, Sodium Carboxymethyl Betaglucon, Sodium Citrate, Glycine Soja Sterols, Tocopherol, Sodium Benzoate, Citric Acid.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες, που να προκύπτουν από τη χρήση του AQUASOL Femina Vaginal Atrophy. Ωστόσο, να μη χρησιμοποιείται σε περίπτωση υπερευαισθησίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

Εάν έχετε αμφιβολίες, εφαρμόστε μικρή ποσότητα της κρέμας στο εσωτερικό μέρος του αντιβραχίου. Εάν εμφανιστούν κόκκινα σημάδια, συνιστούμε να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ενημερώστε τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό σας για οποιοδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες ή εάν επιμένουν τα συμπτώματα.

Προειδοποιήσεις

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy προορίζεται για ατομική χρήση και δεν πρέπει να μοιράζεται. Μακριά από τα παιδιά. Μην καταπίνετε το προϊόν. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από το άμεσο φως και σε θερμοκρασία δωματίου (μεταξύ 5° και 30°C). Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που εμφανίζεται στη συσκευασία.

Παρακαλούμε σημειώστε

Μετά την εφαρμογή ενδέχεται να νιώσετε ένα αίσθημα μυρμηγκιάσης, το οποίο είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί γρήγορα.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχώς για περισσότερες από 30 διαδοχικές ημέρες.

Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy δεν είναι μικροβιοκτόνο ή φάρμακο.

Σε περίπτωση επίμονων ή επαναλαμβανόμενων ενοχλήσεων, πρέπει πάντα να επικοινωνείτε με το γιατρό σας.

Το προϊόν δεν έχει αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν από τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σπέρματοκτόνο και δεν παρέχει προστασία έναντι της εγκυμοσύνης.


Το AQUASOL Femina Vaginal Atrophy διατηρεί τη βέλτιστη κολπική οξύτητα και το σπέρμα είναι αλκαλικό, οπότε η χρήση του προϊόντος ενδέχεται να μειώσει την δραστηριότητα του σπέρματος. Συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν υπάρχει επιθυμία εγκυμοσύνης.

Πιθανές αλληλεπιδράσεις:

Δεν υπάρχουν γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες που να προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή και χορήγηση κολπικών ενυδατικών κρεμών και οιστρογόνων, είτε από το στόμα ή τοπικά εφαρμοζόμενα. Στην περίπτωση ανεπιθύμητων ενεργειών, συμβουλευτείτε το φαρμακοποιό ή το γιατρό σας.

Μέγεθος συσκευασίας: Σωληνάριο 30ml με επαναχρησιμοποιούμενο applicatér



 Biokosmes s.r.l. – sociounico
Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALIA
Κατασκευασμένο στην Ιταλία
Υπό την άδεια της Venture Life Ltd, Bracknell, RG12 1WA, Ηνωμένο Βασίλειο,
www.venture-life.com
Διανομέας: Μινέρβα Φαρμακευτική Α.Ε.
Α. Κηφισού 132, 12 11, Περιστέρι, Τ. 210 5702199

..... Σύμβολα που προβάλλονται



Σήμανση CE που χορηγείται από τον Κοινοποιημένο Φορέα 0476



Κατασκευαστής  Αποθηκεύεται μεταξύ 5° και 30°C



Δείτε τις οδηγίες για τη χρήση πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν



Ημερομηνία λήξης



Αριθμός παρτίδας